


## La medida del Lactato:

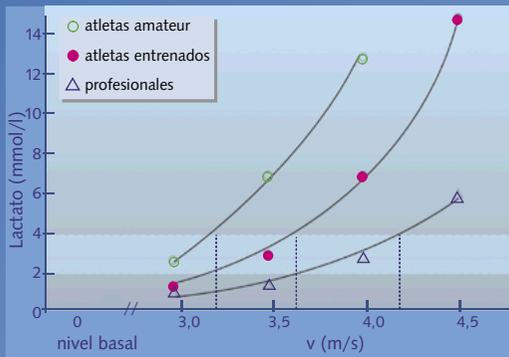

...El nivel óptimo del entrenamiento individual bajo presión, solamente puede ser determinado de forma precisa, mediante la medida del incremento del lactato en la sangre!

...Un entrenamiento forzado es ineficaz

...este método optimiza los entrenamientos de resistencia, la óptima utilización del metabolismo de consumo de las grasas y una más equilibrada actividad del corazón!

## Productos y Accesorios:

### Lactate Scout Starter package

Instrumento Lactate Scout, 2 pilas AAA/LR03, Bolsa de transporte con cinta de cierre, pinchador, 25 lancetas, 30 toallitas con alcohol, 6 tiras, solución de control, manual de instrucciones, poster y otros documentos.

### Smart Pack 12

Tubo con 12 tiras

### Big Pack 30

Tubo con 30 tiras

### Big Pack 24+

Tubo con 24 tiras, 25 lancetas y 30 toallitas con alcohol

### Med Pack 12

Pinchador, 25 lancetas, 30 toallitas con alcohol, solución de control y tubo con 12 tiras

### PC Pack

Software „Lactate Scout Assistant“ para análisis de los resultados, que incluye un cable aprobado para uso técnico-médico, para PC (Puerto COM o USB con convertidor). Para uso solo privado.  
Se requiere una configuración mínima standard: Pentium 90 MHz y Windows 95b, MS Internet Explorer 4.0, 64 MB memoria, 200 MB libres de capacidad de disco duro.  
Información para Software profesional para uso comercial: [www.lactatescout.com](http://www.lactatescout.com)

... Para mayor información contactar con:



Distribuidor para España, Portugal y Andorra  
c/Manuel de Falla, 7  
08034 Barcelona (Spain)  
Tel. +34 93 203 99 63  
[proimco@telefonica.net](mailto:proimco@telefonica.net)  
[www.lactatescout.com](http://www.lactatescout.com)

# Lactate SCOUT



## Funcionamiento bajo control:

- ... Medida del Lactato de forma profesional, rápida y sencilla!
- ... Basada en el diagnóstico preciso del metabolismo!
- ... El análisis objetivo del rendimiento en el deporte!
- ... Un soporte para entrenadores, amateurs y clubs!

SensLab GmbH  
Bautzner Str. 67  
D-04347 Leipzig

Tel. +49 (3 41) 2 34 18 41  
Fax +49 (3 41) 2 34 18 40  
[info@senslab.de](mailto:info@senslab.de)



**SensLab**

# Lactate SCOUT



- ...Una ayuda para el entreno eficaz!
- ...Rápido y fácil de usar, con tiras y selector de pantallas
- ...Una gotita de sangre 0,5 µl, es suficiente
- ...Resultados fiables en 15 segundos
- ...Rango de medida: 0,5-25,0 mmol/l
- ...CV: 3% (según la concentración)
- ...Memoria para 250 resultados, PC-Interface, programa individual

## Medida rápida y sencilla:



- ...Tomar una tira y colocarla en el Lactate Scout
- ...limpiar, higienizar y secar el lóbulo de la oreja o el dedo
- ...pinchar el área con una lanceta
- ...poner en contacto el Lactate Scout con la tira en la gotita de sangre
- ...la tira absorberá solo 0,5 µl sangre, la medición se realiza automáticamente
- ...A los 15 segundos, el valor aparece en la pantalla y queda memorizado
- ...Múltiples opciones para tests progresivos y análisis con el PC-Software

## Se puede utilizar en:



- ...supervisiones médicas y diagnósticos en medicina del deporte
- ...en fisioterapia y rehabilitación
- ...en instituciones deportivas, centros de fitness, clubs y entrenadores
- ...en entreno individual y de equipo,
- ...como alternativa flexible y económica al análisis de laboratorio
- ...puede ser utilizado por amateurs y profesionales
- ...acreditado CE como aparato de diagnóstico médico (Directiva IVD)



Tiras de un solo uso



2x Baterías LR03



Se usa con una mano



PC-Interface

