


# Lactate SCOUT - Modo de empleo

Antes de la utilización del aparato, leer con atención las instrucciones concernientes al modo de empleo y las informaciones suplementarias.

## 1. TIRAS:

Tomar una tira del tubo, y cerrarlo inmediatamente. Insertar la tira en el orificio de Lactate Scout: Si en el display aparece un código que es diferente al impreso en el tubo, quitar la tira y modificar el código.

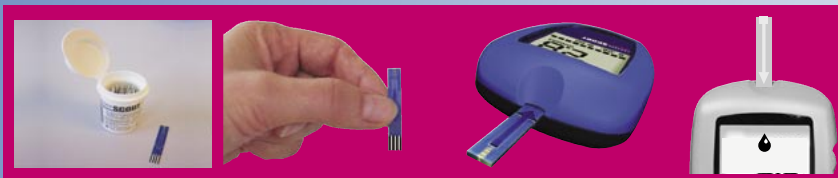

Per modificar el código: Quitar la tira, y presionando la rueda lateral des Lactate Scout durante 1 segundo, y seleccionando „set code“

## 2. PINCHAZO:

Abrir el pinchador y colocar una lanceta nueva. Extraer la tapa de la lanceta con cuidado y tajar el pinchador tirando hacia atrás.



Para evitar riesgo de infección, colocar cada vez una lanceta nueva!

## 3. MEDICION:

Limpiar, higienizar y secar el dedo ó el lóbulo de la oreja. Pinchar el área para obtener la gota de sangre. Poner la tira, ya colocada en el Lactate Scout, en contacto con la sangre durante 3 segundos.



La tira absorberá 0.5 µl de sangre y se escuchará un „bip“. Se iniciará entonces la medición.



## 4. LECTURA:

„LAC“ aparecerá, y la medición se está realizando: A los 15 seg., la medición ha finalizado y aparecerá el resultado. Si las lecturas son superiores a 25 mmol/l, aparecerá HI, y LO si son inferiores a 0,5 mmol/l.



Si desea eliminar algún resultado, mover le rueda lateral hasta que aparezca „dEL“ y presionar: Aparecerá „---“ como confirmación.

## 5. MODO SET:

Este modo permite acceder a diversas opciones. Para acceder a este modo, presionar la rueda lateral durante 1 segundo (no tira colocada) y mover. Cuando aparezca la opción deseada, presionar suavemente la rueda.



**set code:**

el código de las tiras

**Snd:**

volumen del sonido

**clc:**

parar el reloj

**mem:**

lecturas memorizadas

**dAt:**

fecha y hora

**cdn:**

cuenta atrás

**dSC:**

autochequeo del medidor

**dur:**

duración de la medida

El medidor se apaga manualmente presionando la rueda lateral durante 3 seg., o de forma automática a los 5 min. de no utilizarlo.

## 6. PROBLEMA:

Para más información consulte el modo de empleo o en internet [www.lactatescout.com](http://www.lactatescout.com): Si algo no funciona, repetir el test otra vez, siguiendo todas las recomendaciones.

**Er 1:**

La tira es inservible

**bat:**

Sustituir las pilas

**Er 2:**

Insuficiente muestra de sangre



Temperatura demasiado alto/baja

**Er 3:**

El medidor no contacta la tira

**no aparecerá:** El medidor se apaga de forma automática a los 5 minutos de no utilizarlo.

**Er 4:**

Resultado negativa del autochequeo

**Er 5:**

Temperatura demasiado alta o baja

**Er 6:**

Error interno de electrónico

Guardar el recipiente de las tiras siempre bien cerrado. Mantener el aparato y las tiras en lugar seco y fresco.